

 Diakonhjemmet Sykehus Avdeling for medisinsk biokjemi/Blodbank/Retningslinjer for blodbanktjenesten	Ref nr: A.2.2-27.3.9
Blodbank - Uttak og retur av reserverte SAG i Lexit	Versjon: 3.00
	Gyldig fra: 27.02.2026

Endringer siden forrige versjon

Oppdatert mal

1. HENSIKT

Sikre at dato, klokkeslett og ID på person som henter ut reserverte produkter fra blodbankkjøleskapet blir loggført i Lexit.

2. MÅLGRUPPE

Ansatte ved Avdeling for medisinsk biokjemi og øvrig personell ved sykehuset som har opplæring i å hente ut blodprodukter.

3. DEFINISJONER

AMB = Avdeling for Medisinsk biokjemi

BiO = Blodbanken i Oslo

SAG = SAGMAN-blod (konsentrat av røde blodceller)

4. ANSVAR

Bioingeniør med fagansvar for hematologi, koagulasjon, blodbank og uriner.

Innhold

1. HENSIKT	1
2. MÅLGRUPPE.....	1
3. DEFINISJONER	1
4. ANSVAR.....	1
5. UTTAK AV RESERVEARTE BLODPOSER	1
6. RETUR AV RESERVEARTE BLODPOSER.....	1

5. UTTAK AV RESERVEARTE BLODPOSER

Vi er pålagt å loggføre dato, klokkeslett og ID på person som henter ut reserverte produkter fra blodbankkjøleskapet. Det samme gjelder innlegging av reserverte blodposer som har vært ute, og der temperaturknappen ikke har skiftet farge (gjelder ikke produkter mottatt til lager fra BiO). Hensikten er å kunne spore hvor lenge en SAG har vært oppbevart utenfor kjøleskapet før transfusjon, og hvem som hentet produktet.

- Logg inn ved å legge **ansattkortet ditt** på kortleseren. Dersom du ikke er registrert som bruker må du registreres av en ansatt ved AMB.
- Finn reservert SAG som skal hentes i øverste skuff i blodbankkjøleskapet.
- Registrer **alle blodposer** du tar ut ved å skanne strekkoden øverst på blodposen (begynner med J), som vist på bildet under. Bruk håndskanneren. Nederst på skjermen vil du se hva du har tatt ut.



- Logg ut ved å legge ansattkortet på kortleseren.

6. RETUR AV RESERVEARTE BLODPOSER

 Diakonhjemmet Sykehus	Ref nr: A.2.2-27.3.9 Versjon: 3.00
Blodbank - Uttak og retur av reserverte SAG i Lexit	Gyldig fra: 27.02.2026

Utføres kun av ansatte ved AMB.

- Logg inn.
- Velg **Funksjon**: skjermen viser Inn
- **Skann blodpose** som skal tilbake i blodbankkjøleskapet.
- Nede på skjermen vil du se hva du har lagt inn.
- Logg ut.